
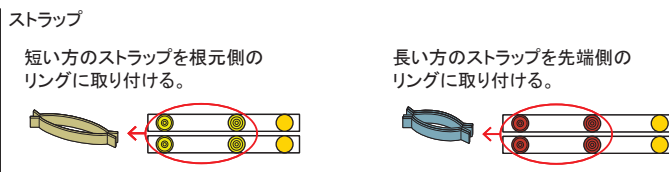


① パーツ名称の説明

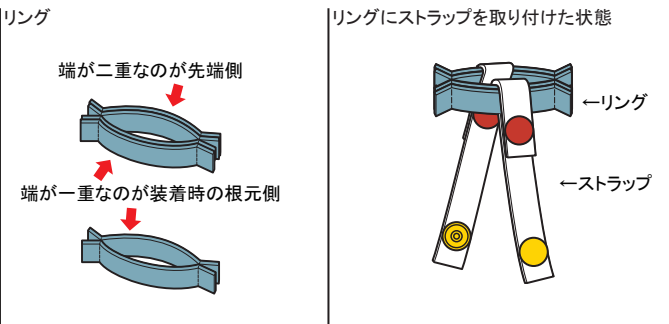

リングサイズ

| リング | リング色 | 細い方の内径 | 太い方の内径 |
|------|---------|--------|--------|
| サイズ1 | ライトイエロー | 15 | 18 |
| サイズ2 | ミント | 17 | 18 |
| サイズ3 | スカイブルー | 19 | 20 |
| サイズ4 | ライトイエロー | 21 | 22 |
| サイズ5 | ミント | 23 | 24 |
| サイズ6 | スカイブルー | 25 | 26 |
| サイズ7 | ライトイエロー | 27 | 28 |

ストラップサイズ

| ストラップ | 全長 (mm) | ストラップボタン色 | | | |
|-------|---------|-----------|------------|-----|-----|
| | | リング固定用ボタン | 本体との取付用ボタン | | |
| Aサイズ | 56 | 水色 | 濃黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 |
| Bサイズ | 61 | 黄緑色 | 濃黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 |
| Cサイズ | 66 | 薄黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 |
| Dサイズ | 71 | 橙色 | 濃黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 |
| Eサイズ | 76 | 青色 | 濃黄色 | 濃黄色 | 濃黄色 |

② ペニレブ着用方法の説明

②-1 装着の基本的な考え方

仮性包莖の場合

| | | | |
|---------|-----|---|-----|
| 装着部位 | 根元側 | ⇒ | 先端側 |
| リング | 大径 | ⇒ | 小径 |
| ストラップ | 短い | ⇒ | 長い |
| 装着順序 | 先 | ⇒ | 後 |
| 下着ボタン位置 | 下 | ⇒ | 上 |



真性包莖の場合

| | | | | |
|---------|-----|---|-----|------|
| 装着部位 | 根元側 | ⇒ | 先端側 | 龟头部分 |
| リング | 大径 | ⇒ | 小径 | 大径 |
| ストラップ | 短い | ⇒ | ⇒ | 長い |
| 装着順序 | 先 | ⇒ | ⇒ | 後 |
| 下着ボタン位置 | 下 | ⇒ | ⇒ | 上 |

②-2 リングとストラップの組み合わせ例






| 仮性包莖の方 | 部位D | 部位C | 部位B | 部位A |
|---------|------|------|------|------|
| リング | サイズ5 | サイズ4 | サイズ3 | サイズ5 |
| ストラップ | Bサイズ | Cサイズ | Dサイズ | Eサイズ |
| 下着ボタン位置 | 下 | 中 | 上 | |

| 真性包莖の方 | 部位D | 部位C | 部位B | 部位A |
|---------|------|------|------|------|
| リング | サイズ5 | サイズ4 | サイズ3 | サイズ5 |
| ストラップ | Cサイズ | Dサイズ | Eサイズ | |
| 下着ボタン位置 | 下 | 中 | 上 | |

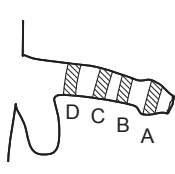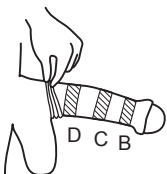


③ リングとストラップの下着への取付け手順の説明

ここからはリングを2つ取り付ける時の例です。

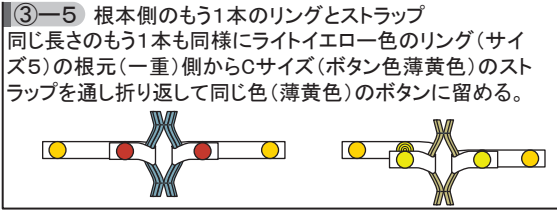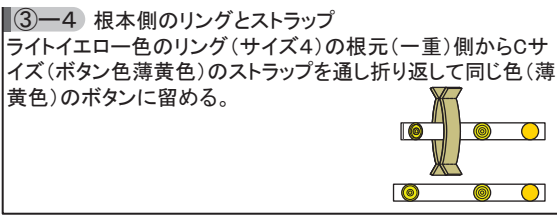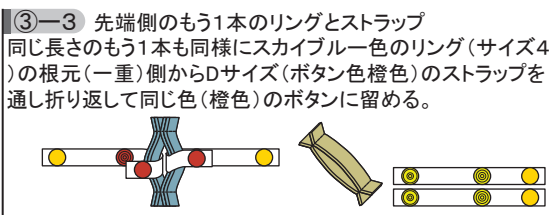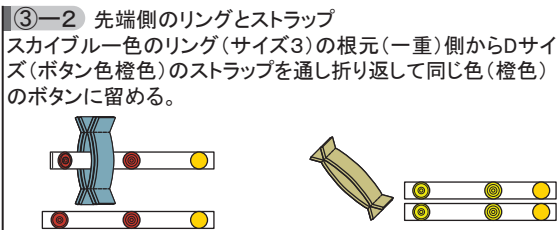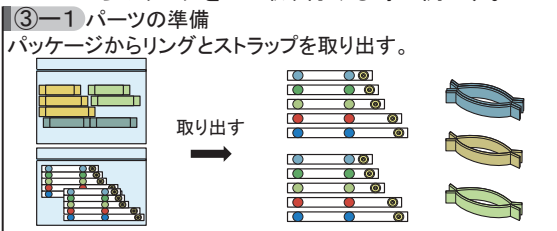

ストラップの取付場所はお好みで変えて下さい。
リング2つの場合の取付例


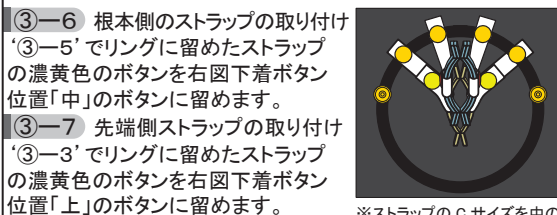


※ストラップのCサイズを中のボタン位置で固定した例

④ 下着の着用手順の説明

④-1 サオだけ穴から出す
上部のカバーを下着から外し、陰茎(龟头)が下着の開口部の穴から出るぐらいの分だけ下着を上上げる。
(まだ陰嚢は穴から出さない。まだ腰まで腰バンドを上げない)

④-2 根本、先端部のリングを通す
根元側のリングから順番に陰茎に装着する
ポイント1:包皮はなるべく根元に近い側に寄せてリング位置を調節します。
ポイント2:リング位置を調節する時にリングの持ち手部分(上図の赤丸部分)を持ってリングを広げると調節しやすいです。
ポイント3:なるべく先端(龟头)側にストラップを伸ばしてリングを取り付けた方が、包皮が根元方向に矯正されます。ストラップに緩み、弛みが無い状態が望ましいです。
リングの引っ張りが強過ぎると感じる場合は、ストラップを1サイズ以上長い物に交換して下さい。
ポイント4:リングが緩い、キツイと感じる場合は、リング固定用ボタンを外し、リングを交換して下さい。
ポイント5:小さ過ぎるリングを装着すると、小便時に残尿が発生したり、陰茎根元部のリング径を小さくすると陰茎が勃起する可能性があります。
ポイント6:装着後に違和感を感じなければ適切に装着できています。

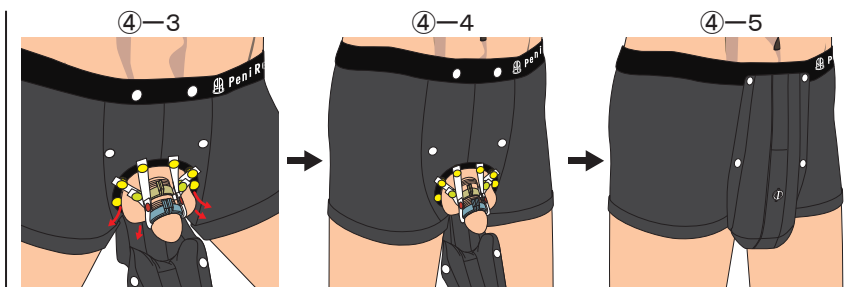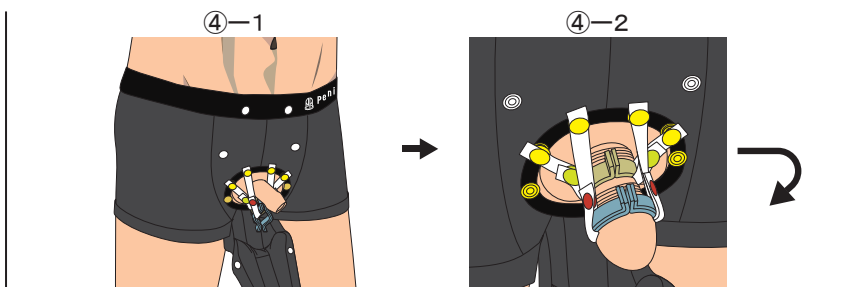

④-3 玉も穴から出す
リング位置の調節が終わったら、足を広げて陰嚢(玉)を穴からすべて出します。

④-4 腰バンドを腰まで上げる
腰バンドを腰の位置まで上げます。下着が左右にズレている場合は、腰バンドを左右に回して調節して下さい。

④-5 カバーを付けて完了
カバーのボタン2つを下着の腰バンド部分に取り付けると着用完了です。

⑤ 就寝時の着用について

- 1) 仰向け、横向き寝であればリングを陰茎に装着したまま、通常の着用状態で就寝しても問題無いと思います。起床時の陰茎のうっ血状態をご確認ください。
- 2) 気になるようでしたら、お好みに応じて取り外して下さい。リング+ストラップを下着から外しても良いですし、リングを装着したまま、ストラップを下着から外しても構いません。